

BMS 015 – ACRILAT PENTRU REPARATII, AUTOPOLIMERIZABIL.

BMS015 ESTE UN ACRILAT DE POLIMERIZARE LA RECE PENTRU PROTEZE DENTARE PE BAZĂ DE METACRILAT ȘI CU CLARITATE ȘI PROPRIETĂȚI MECANICE FOARTE BUNE.

INDICAȚII DE UTILIZARE:

RĂȘINA ACRILAT PENTRU REPARAȚIA ȘI CĂPTUȘIREA PROTEZELOR DENTARE, COMPLETAREA PROTEZELOR SCHELETATE ȘI UTILIZARE ÎN ORTODONȚIE.

CONTRAINDICAȚII:

NICIO CONTRAINDICATIE, DACĂ SE RESPECTĂ MODUL CORECT DE UTILIZARE.

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE:

TURNAȚI 10ML LICHID ÎN 13G DE PULBERE SI AMESTECAȚI TIMP DE 30 DE SECUNDE LA TEMPERATURA CAMEREI, PÂNĂ SE OBȚINE CONSISTENȚA DORITĂ.

APLICAȚI RĂȘINA PE SUPRAFAȚA PROTEZEI.

ELIMINAȚI ORICE BULĂ DE AER, VIBRÂND VASUL DE AMESTEC ȘI/SAU PUNEȚI-O LA POLIMERIZAT ÎN APĂ CALDA (50°C) SUB PRESIUNE (2-2,5 BAR).

NOTĂ: UTILIZAREA UNEI OALE SUB PRESIUNE , ELIMINA FORMAREA BULELOR (DE EX. UNDE EXISTĂ SECȚIUNI DE PROTEZA GROASĂ, TEMPERATURA EXTERIORĂ MARE, ETC.)

APLICAȚII:

RAPORT DE AMESTEC: 13 G PULBERE: 10 ML LICHID

TIMP DE AMESTECARE: APROX. 30 DE SECUNDE.

TIMP DE LUCRU: APROX. 2 MINUTE

TIMP DE POLIMERIZARE: APROX. 14 MINUTE.

TOȚI TIMPII SUNT CALCULATI LA TEMPERATURA DE 23 ±2 °C (74 °F ±2 °F)

ÎNCEPÂND DIN FAZA DE AMESTEC.

NOTĂ: NU AMESTECAȚI PULBEREA ȘI LICHIDUL LÂNGĂ FLACĂRĂ DESCHISĂ.

DEPOZITARE:

PĂSTRAȚI MATERIALUL ÎNTR-UN LOC RĂCOROS, USCAT ȘI BINE VENTILAT. EVITAȚI SOARELE DIRECTE ȘI CĂLDURA.

NU DEPĂȘIȚI TEMPERATURA MEDIULUI DE 40°C, PENTRU PĂSTRA NEALTERATE, CARACTERISTICILE CHIMICO-FIZICE PANA LA DATA DE EXPIRARE.

TEMPERATURA DE AUTOINFLABILITATE: 421,1°C.

PĂSTRAȚI ÎNTOTDEAUNA MATERIALUL BINE ÎNCHIS DUPĂ UTILIZARE.

A NU SE LĂSA LA INDEMANA COPIILOR.

MATERIALUL NU TREBUIE FOLOSIT DUPĂ DATA DE EXPIRARE.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ A LICHIDELOR:

FOARTE INFLAMABIL, PĂSTRAȚI PRODUSUL, DEPARTE DE SURSE DE FOC – NU FUMAȚI IN APROPIERE.

PĂSTRAȚI LOCUL DE LUCRU BINE VENTILAT.

IRITANT PENTRU OCHI, SISTEMUL RESPIRATORII SI PIELE.

DUPĂ CONTACTUL CU OCHII, SPĂLAȚI BINE CU APA ȘI SOLICITAȚI SFATUL MEDICULUI.

DUPĂ CONTACTUL CU PIELEA SPĂLAȚI IMEDIAT CU MULTĂ APĂ ȘI SAPUN.

POATE PROVOCA IRITATII LA CONTACTUL MAI INDELUNGAT CU PIELEA, DE ACEEA, RECOMANDĂM PURTAREA MANUSILOR SI OCHELARI DE PROTECTIE A OCHILOR.

CONTINE METIL-METACRILAT.

DISPONIBIL: ROZ
ROZ CU VINISOARE

NUMAI PENTRU UZ DENTAR.

UTILIZARE REZERVATĂ STRICT MEDICILOR STOMATOLOGI SI TEHNICIENILOR DENTARI.