

BMS 016 ACRILAT AUTO-POLIMERIZABILA PENTRU ORTODONTIE

EN ISO 20795-1 - CLASA I - TIP I FARA CADNIUM SI PLUMB

INDICATII: PENTRU APARATE ORTODONTICE.

CONTRA INDICATII: NU SUNT, DACA SUNT RESPECTATE RECOMANDARILE.

MOD DE LUCRU:

PROPORTII DE AMESTEC: 25 g PULBERE + 10 ml LICHID

TIMP DE AMESTEC: APROX. 30 SECUNDE

TIMP DE LUCRU: APROX. 5 MINUTE

TIMP DE PRIZA: APROX. 10 MINUTE

MOD DE LUCRU:

CURATATI MODELUL DE CEARA SI IZOLATI-L CU IZOLANTUL **BMS 009**.

AMESTECATI 10 ml. DE LICHID CU 25 g. DE PULBERE, PANA LA ATINGEREA CONSISTENTEI DORITE. BULELE DE AER TREBUIE ELIMINATE PRIN VIBRAREA VASULUI DE AMESTEC.

RECOMANDAM POLIMERIZAREA TIMP DE 10 MIN LA 50° C SI LA O PRESIUNE DE 2 – 2,5 BAR.

TOTI TIMPI SUNT CALCULATI LA TEMPERATURA CAMEREI (23 ±2 °C) INCEPAND DE LA STARTUL AMESTECULUI.

NOTA: NU AMESTECATI IN APROPIERE DE FLACARA DESCHISA.

DEPOZITARE:

DEPOZITATI MATERIALUL INTR-UN LOC RACOROS, USCAT SI BINE VENTILAT. EVITATI SOARELE DIRECT SI CALDURA. NU DEPASITI TEMPERATURA MEDIULUI DE 40°C. PENTRU A MENTINE NEALTERATE CARACTERISTICILE CHIMO-FIZICE, A SE CONSUMA PANA LA DATA DE EXPIRARE.

TEMPERATURA DE AUTOINFLAMABILITATE: 421,1°C.

PASTRATI INTOTDEAUNA MATERIALUL INCHIS IN SIGURANTA DUPA UTILIZARE. A NU SE LASA LA INDEMANA COPIILOR.

MATERIALUL NU MAI TREBUIE UTILIZAT DUPA DATA DE EXPIRARE.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANTA:

CONTINE METIL-METACRILAT. FOARTE INFLAMABIL, A SE PASTRA DEPARTE DE SURSE DE APRINDERE – FUMATUL INTERZIS.

PASTRATI LOCUL DE LUCRARE BINE VENTILAT.

IRITANT PENTRU OCHI, SISTEMUL RESPIRATOR SI PIELE. DUPA CONTACTUL CU OCHII, SPALATI BINE CU APA SI SAPUN SI SOLICITATI CONSULTATIE MEDICALA. DUPA CONTACTUL CU PIELEA, SPALATI IMEDIAT CU APA SI SAPUN DIN ABUNDENTA.

POATE CAUZA SENSIBILIZARE PENTRU CONTACTUL CU PIELEA DE LUNGA DURATA, AȘADAR, RECOMANDAM SA PURTATI MANUSI SI OCHELARI DE PROTECTIE.

CULOARE DISPONIBILA: CRISTAL.

INFORMATII PRIVIND NEUTRALIZAREA:

ATENȚIONARI: LICHIDUL ESTE PERICULOS, NU ARUNCATI IN CANALIZARE. SPALATI SI RECICLATI RECIPIENTELE, DACA ESTE POSIBIL. ARUNCATI INTODEAUNA IN MOD CORESPUNZATOR, RESPECTAND LEGILE LOCALE.

NUMAI PENTRU UZ STOMATOLOGIC. UTILIZAREA ESTE REZERVATA STRICT MEDICILOR STOMATOLOGI SI TEHNICIENILOR DENTARI.

