


# EuroTest®


L'union entre la qualité et le budget

## INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

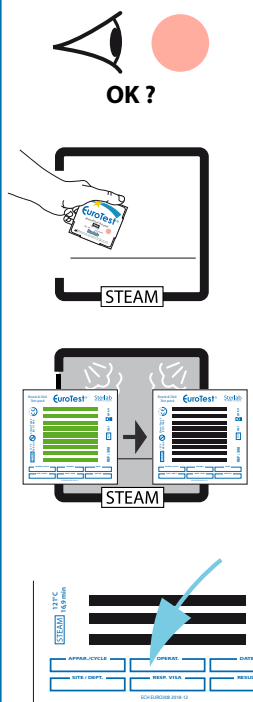

- Verificati indicatorul exterior de culoare roz pentru a va asigura ca EuroTest® nu a fost deja folosit (dupa procesare culoarea se schimba in negru)
- Plasati pachetul EuroTest® pe raftul din mijloc intr-o autoclava goala, cu eticheta directionata in sus
- Rulati un ciclu Bowie & Dick pentru 3.5 min ( $\pm 5$  sec) la 134°C ( $0+1.5^\circ\text{C}$ ). In urma procesarii cerneala testului indicator isi va schimba culoarea din verde deschis in negru/gri antracit
- ILa terminarea ciclului deschideti pachetul test si scoateti testul indicator din pachet, pe care completati rubricile corespunzatoare
- EuroTest® se depoziteaza la temperatura camerei, ferit de umiditate


## INTERPRETAREA REZULTATELOR

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

**Fig. 1**  
**Neprocesat**



**Fig. 2**  
**CORECT**  
Culoarea se schimba in negru/gri inchis. Schimbarea de culoare este omogena

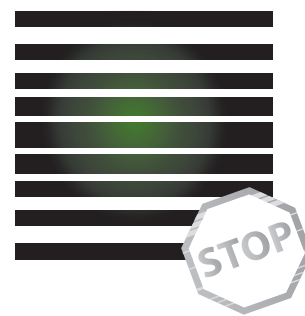

**Fig. 3**  
**INCORECT**  
Apare o decolorare in centrul testului. Schimbarea de culoare nu este uniforma si se schimba in maro