

Temdent

Classic



Schütz Dental GmbH
Dieselstr. 5-6 • 61191 Rosbach/Germany • Tel.: +49 (0) 6003 814-0 • Fax: +49 (0) 6003 814-906
www.schuetz-dental.de • info@schuetz-dental.de

CE 0297

Mandler 03/2016 – 1000

Dacă nu înțelegeți în întregime modul de utilizare, vă rugăm să vă adresați serviciului nostru pentru clienți înainte de a utiliza produsul.

Instrucțiuni de utilizare

Temdent Classic este un produs pudră / lichid pentru fabricarea coroanelor temporare și a punților. Temdent Classic este un polimer care polimerizează la rece cu o bază metacrilat de polimetil care conține doar 0.8% monomer rezidual.

Temdent Classic este adecvat atât pentru metodele directe cât și pentru cele indirecte.

Mixarea și reglarea culorii

Mixați Temdent Classic într-o cupă. Puteți utiliza orice dozaj.

Vâscozitatea trebuie să fie cremoasă sau ca aluatul. Acesta corespunde la circa 1,8-2,2 g de pudră până la 1 g de lichid (rata de amestecare este de circa 2:1).

Umpleți cupa cu lichid. Pentru o coroană medie, aveți nevoie de circa 8 picături (0,15 g) și circa 0,3 g de pudră. Puteți regla culoarea amestecând pudră deschisă la culoare cu pudră de culoare închisă.

Metoda indirectă

Izolați modelul in situ cu spray cu silicon. Acoperiți cu o folie cu ajutorul unui aparat de formare la cald. Tăiați marginile excedentare. Pentru a stabiliza marginile subțiri, recomandăm utilizarea unei folii de formare la cald disponibilă în comerț. Amestecați pentru uz comercial. Amestecați Temdent Classic cașa cum este descris și turnați direct în matriță. Perioada de timp de la adăugarea pulberii în lichid până la aplicarea produsului nu trebuie să depășească 2 minute. Folia matriță trebuie să fie aplicată precis pe model pentru a evita ridicarea mușcăturii și pentru a preveni corecții ulterioare în interiorul gurii.

După circa 6 minute, ridicați cu atenție proteza provizorie. Acum începe faza elastică de circa 1,5 minute. În acest timp, cu ajutorul unui instrument eliminați marginile care depășesc. Pentru întărirea finală, circa 2 minute, proteza temporară rămâne pe model. După întărirea finală, frezați și șlefuiți marginile.

Metoda directă

Tehnica de amprentare

După pregătirea dintelui, luați o amprentă în alginat sau silicon (de ex.: Trealgin, Tresident, Schütz Dental Group) și păstrați-o în modul obișnuit.

După pregătire, amestecați Temdent Classic așa cum este descris mai sus.

Dacă este cazul, eliminați septa interdente și uscați amprenta prin suflare. Lăsați Temdent Classic amestecat să curgă în zona dorită a amprentei. Durează circa două minute să se așeze materialul. Înainte de a amplasa în gură amprenta umplută cu Temdent Classic, asigurați-vă că rădăcinile pregătite sunt izolate (de exemplu cu vaselină).

Apoi aplicați Temdent Classic cu amprenta în gură.

Priza Temdent este lentă. După circa 3 minute și jumătate, este posibil să se scoată proteza provizorie în faza elastică. Această măsură evită o legare bruscă a Temdent Classic

de dinții pregătiți. Dacă proteza provizorie aderă la preparat, trebuie să fie scoasă cu grijă și repusă în amprentă până la întărire. După întărire, forma protezei provizorii s-a stabilizat și poate să fie prelucrată.

Tehnica cu matrice

Așa cum a fost descris mai sus, formați la cald o folie de 0,6 – 0,8 mm grosime pe un model anatomic cu ajutorul unui spray cu silicon.

Amestecați Temdent Classic așa cum este descris și turnați în matrice. Momentul de adăugare a pudrei în lichid nu trebuie să depășească 2 minute.

Folia matrice trebuie să fie rearanjată cu precizie pe rândul de dinți. Pacientul strânge dinții, dar nu este necesar să scrâșnească. După circa 3 minute și jumătate, scoateți cu grijă proteza provizorie și matricea din gură. Prelucrarea ulterioară se realizează așa cum a fost prezentat mai sus.

Depozitare

Materialul trebuie să fie depozitat la temperatură între 10 °C și 25°C. Închideți recipientul imediat după utilizare. Nu apropiați de surse de aprindere, iar fumatul este interzis.

Dezafectare

Această pudră poate fi dezafectată cu gunoiul menajer. Lichidul trebuie să fie dezafectat ca deșeu periculos.

Garanție

Instrucțiunile de utilizare, fie prezentate verbal, în scris sau prin demonstrații practice sunt bazate pe experiența noastră profesională și se consideră a fi doar orientative.

Efecte secundare:

Efectele secundare ale acestui produs medical sunt extrem de rare atunci când produsul este utilizat în mod corect. Reacțiile sistemului imunitar (de exemplu alergii) sau senzații de disconfort local nu pot fi totuși excluse complet. În cazul în care vă sunt aduse la cunoștință efecte secundare vă rugăm să ne informați, chiar dacă nu sunteți absolut sigur.

Contraindicații / interacțiuni

În cazul în care pacientul are alergii cunoscute sau hipersensibilitate la unul dintre componentele acestui produs, recomandăm să nu mai utilizați produsul, sau se va utiliza doar sub atență supraveghere medicală. În aceste cazuri, ingredientele produsului medical furnizat de noi sunt disponibile la cerere. Reacțiile încrucișate sau interacțiunile cunoscute ale produsului medical cu alte materiale deja prezente în gură trebuie să fie evaluate de dentist înainte de utilizare.

Observație:

Vă rugăm să comunicați informațiile de mai sus dentistului curant dacă utilizați acest produs într-un dispozitiv medical sau model personalizat. La utilizare vă rugăm să respectați fișele de date de siguranță.

Depanare

| Problema | Cauza | Remediu |
|--|---|---|
| Plasticul nu polimerizează adecvat | Proporția amestecului este incorectă. | <ul style="list-style-type: none">- Respectați instrucțiunile de utilizare- Aplicați proporțiile corecte |
| Plasticul polimerizează prea rapid / prea lent | Temperatură neadecvată a mediului ambiant Temperaturile înalte accelerează polimerizarea. Temperaturile reduse o încetinesc | Selectați o altă proporție de amestecare a pudrei |
| Culoarea nu este corectă | Pudrele deschise și închise la culoare pot fi amestecate individual | Selectați o altă proporție de amestecare a pudrei |
| Proteza temporară aderă la dintele pregătit | A fost lăsată prea mult timp în gură | Respectați instrucțiunile de utilizare |