

Instructiuni de utilizare pentru ace de sutura sterile cu fir multifilament impletit

1 Descriere

Acele de sutura sterile cu fir sunt fabricate din otel inoxidabil de uz medical de inalta calitate, combinate cu matase naturala de uz medical si impreuna se utilizeaza asupra tesuturile moi ale corpului uman. Acul asigura o penetrare usoara prin tesut

2 Caracteristici

Penetrare optima și rezistenta a acului, fir neted si moale, buna siguranta a nodurilor si rezistenta la tractiune mai mare decat cea impusa de standardele de referinta USP (Farmacopeea Statelor Unite) .

Non-resorbabile.

3 Specificatii

Acul: curbat, 0-180 degrees.

Firul de sutura: in general negru, diametrul corespunde cu USP8/0-2, lungimea variaza de la 45cm la 90cm.

4 Domeniul de utilizare

Sunt utilizate in apropierea si ligaturarea tesuturilor moi in chirurgia generala, ginecologie, urologie, ortopedie,etc.

5 Avertizari

6.1 Este interzisa folosirea in tesuturile care servesc la sustinerea altor tesuturi, precum tesuturi conjunctive.

6.2 A nu se folosi daca ambalajul este deteriorat.

6.3 A nu se folosi dupa termenul de expirare.

6 Precautii

6.1 Alegeti cu atentie acele de sutura in functie de procedura ce urmeaza sa o efectuati .

6.2 Nu re-sterilizati acele .

6.3 Firul de sutura are un invelis ceruit si siliconat, astfel firul ramas dupa sutura trebuie sa fie de minim 0.5cm.

6.4 Manevrati cu atentie pentru evitarea eventualelor accidentari.

6.5 Evitati deteriorarea suturii la manevrarea cu un portac sau cleste.

6.6 Folosirea cu succes a acestor produse necesita pregatire adecvata si experienta

6.7 Dupa interventie, produsul trebuie eliminat conform normelor in vigoare pentru a evita accidentarile.

7 Depozitare

Conditii de depozitare recomandate: la temperaturi sub 25°C, ferite de umezeala si surse de caldura directa.

8 Durata de viata: 5 ani. Nu folositi dupa expirare.

9 Impachetare

Pachet unitar: folie aluminiu

Impachetare in cutie: 12 folii /per cutie

Impachetare la bax: 50 cutii /per bax

10 Simboluri folosite pe eticheta



Atentie



De unica folosinta



Data fabricatiei



Sterilizat cu raze



Numar lot



Data de expirare



Producator



Reprezentat European Autorizat