

CEARA DE MODELARE DENTARĂ

Proprietăți și caracteristici:

- 1) Rezistență și rigiditate ridicate la temperatura gurii.
- 2) Interval larg de înmuiere peste temperatura gurii.
- 3) Se modelează cu ușurință în stare moale, fără descumare, crăpare sau rupere.
- 4) Con tracție termică scăzută.
- 5) Se sculptează cu ușurință la temperatura camerei, fără descumare sau ciobire.
- 6) Ar trebui să existe mici modificări ale proprietăților la topire și resolidificare.
- 7) Nu ar trebui să existe reziduuri la fierbere.

Mai jos o scurtă descriere a modului de utilizare

Mod de utilizare:

Luați o foaie de ceară și rupeți-o în două, înmuiati foaia de ceară deasupra flăcării arzătorului Bunsen și apăsați-o pe modelul din ghip. Asigurați-vă că ceara intră în toate adănciturile și crăpăturile modelului și apoi tăiați/ sculpați excesul de ceară folosind un cuțit încălzit.

Luați o foaie de ceară și înmuiati deasupra flăcării arzătorului Bunsen și modelați ceara într-un bloc, acesta ar fi potrivit pentru înregistrarea ocluziei.

Notă:

Cerurile pentru plăci de bază trebuie să aibă o astfel de textură încât să se sculpeze curat, la temperatura camerei folosind cutit normal de laborator dentar.

Înmuiere: ceara trebuie să se înmoaie fără să se scămoseze sau să devină fărâmicioasă și fără a adera de degete.

Taierea/Sculptura: ceara trebuie să se taie ușor și clar, fără a se rupe sau ciobi.

BMS DENTAL S.r.l.

Head Office, Italy: Via M. Buonarroti, 21-23-25 - Zona Industriale - 56033 CAPANNOLI (Pisa) – Ital Tel. +39 0587 606.089 - Fax +39 0587 606.875 - e-mail: info@bmsdental.it - www.bmsdental.it

Capitale Sociale € 98.120 - P.IVA0143815 050 8 - C.C.I.A.A. N.127927 - Reg. Impr. Pisa PI - 1998 - 8024 - Export License: PI 015688