



INSTRUCIUNI DE UTILIZARE - GIPS BMS TIP III

1. Indicații

Gips exradur clasa III (ISO6873) pentru toate modelele protetice.

2. Mod de lucru

Raport de amestec: 100 g pulbere: 26-28 ml apă.

Cantitatea de apă poate fi mărită sau redusă cu până la 2 ml. Cu mai puțin lichid, dilatarea va crește, gipsul va fi mai dur și timpul de lucru va fi mai scurt. Mai mult lichid are efectul invers. Dacă doriți să turnați mai multe modele, vă rugăm să aveți grijă să amestecați suficient.

Goliți ghipsul în bolul de amestecare și apoi adăugați apă. Amestecați încet cu mâna până când pulberea și lichidul sunt bine amestecate. Apoi amestecați sub vid timp de 45 de secunde la 80% vid, Rpm.

Începeți acțiunea de amestecare după ce a fost atins nivelul de vid complet. Când amestecați manual, timpul de amestecare este de 60 de secunde. Lăsați bolurile de amestecare care nu sunt necesare mereu umplute cu apă.

BMS DENTAL

Via M. Buonarroti, 21/23/25

ZONA IND. 56033 Capannoli (Pi) Italy

Tel/fax: +390587606089/875