

R-901 Vacuum Malaxor

Caracteristici tehnice:

Tensiune alimentare: 230 V,

Curent: 0,5 A,

Putere: 35 W,

Greutate: 12 Kg,

Dimensiuni: 12 x 24 x 47 cm.

Instructiuni de utilizare:

1. Conectați aerul comprimat la conectorul de aer comprimat al aparatului și reglați presiunea la cel puțin 4 kg/cm².
2. Setati timpul de amestecare.
3. Așezați bolul de amestecare la cuplajul motorului și mențineți-l până când manometrul de vacuum ajunge la 80 kpa.
4. Apasati **Butonul pornire** alimentare (pornire aspirație).
5. Apăsati butonul **Pornire amestec** pentru a începe amestecarea.
6. Țineți bolul de mixare apăsat când sună alarma aparatului (Be Be ...).
7. Opriti **Butonul pornire** și deconectați bolul de mixare.

Nota: Pentru a evita blocarea furtunului de aer, NU umpleti bolul de amestec.

Depanare:

1. Bolul de mixare nu poate fi aspirat de aparat:

- (a) Manometrul de vid trebuie să atingă cel puțin 85 kpa.
- (b) Manometrul de aer trebuie să atingă cel puțin 4 kg/cm².
- (c) Verificați dacă garnitura bolului sau a aparatului prezintă scurgeri.
- (d) Verificați blocarea vidului.

2. Motorul nu funcționează: Porniți comutatorul de alimentare.

- (a) Martorul luminos al comutatorului de alimentare este aprins - verificați sau înlocuiți comutatorul roșu de jos.
- (b) Martorul luminos al comutatorului de alimentare este stins - verificați sau înlocuiți siguranța sau comutatorul de alimentare.

