

Manualul utilizatorului

R-1202 Aparat pentru electroliza


Mulțumim că folosiți acest aparat pentru electroliză R-1202.

Pentru a utiliza produsul în mod corespunzător, vă rugăm să citiți cu atenție informațiile despre produs înainte de utilizare.

Păstrați manualul de utilizare pentru a-l consulta atunci când este necesar.

Introducere:


Acest produs oferă o electroliză uniformă, fără înnegrire și cu un grad ridicat de luciu. Poate realiza electropolishare continuă pe termen lung; dispune de temporizare și reglare a intensității. Celula dublă poate electroliza două aparate dentare simultan sau poate fi utilizată alternativ, fără a fi necesară așteptarea răcirii.

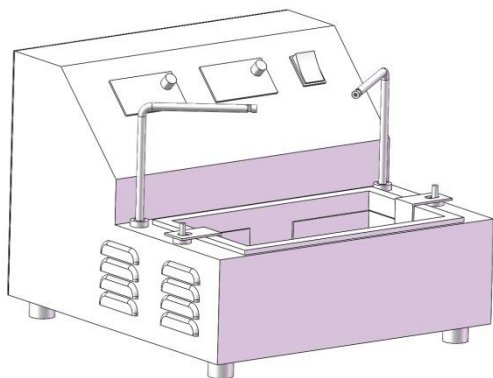

Parametrii:

Model	R-1202
Tensiune	100-240V
Frecventa	50/60Hz
Putere	750W
Greutate	7.5Kg
Dimensiuni	360*350*270mm

Functionare:

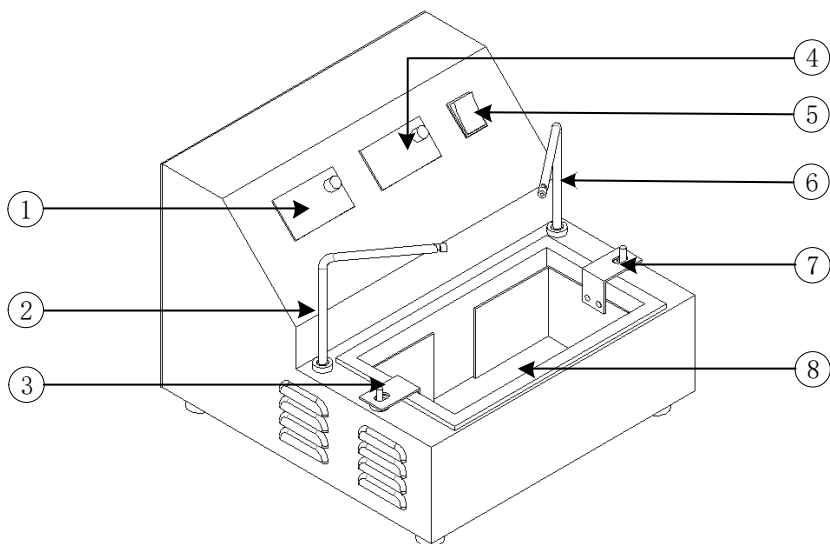

- (1) Ecran de control pentru unitatea din stanga
- (2) Electrode pozitiv stanga
- (3) Electrode negative stanga
- (4) Ecran de control pentru unitatea din dreapta
- (5) Buton pornire
- (6) Electrode pozitiv dreapta
- (7) Electrode negative dreapta
- (8) Cuva

Unitatea de control:



- (1) Butonul pornire ecran
- (2) Butonul de setare
- (3) Potentiometru setare
- (4) Buton de comutare setari

1. Tensiunea și modul de funcționare:

Tensiunea de lucru setată din fabrică pentru acest aparat este de 20V, curentul este de 15A, iar timpul de electroliză poate fi ajustat liber în funcție de necesități.

Unitățile de control stânga și dreapta controlează câte un set de plăci de electrozi pozitivi și negativi.

Folosiți butonul de comutare ④ de pe unitatea de control pentru a porni sau opri funcționarea.

Când timpul de electroliză se încheie, ecranul complet clipește, iar prin apăsarea oricărui buton se revine la interfața de așteptare.

2. Modificarea timpului de electroliză:

Reglați timpul (în secunde) rotind potentiometrul.


Comutați cursorul dintre minute și secunde printr-o apăsare scurtă a „Butonului de comutare a setărilor”.

3. Interfața de vizualizare a valorilor parametrilor setați:

Ambele ecrane ale unitatii de control, cat si de vizualizarea parametrilor setați pot fi accesate printr-o apăsare scurtă a „butonului de comutare a afișajului”.

Dacă nu se efectuează nicio acțiune în 5 secunde, interfața se închide automat.

Functionare:

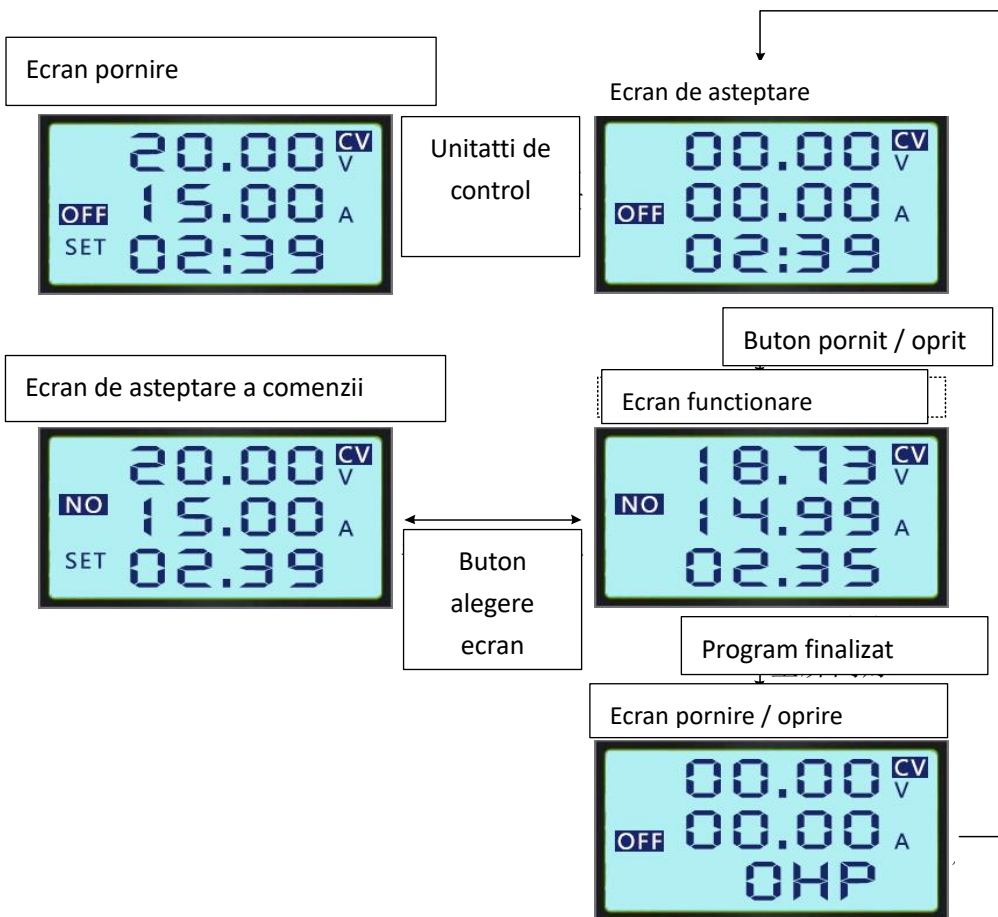

Important:

Durata de viață a electrolitului este limitată, iar atunci când efectul de luciu al electropolishării scade, vă rugăm să îl înlocuiți la timp.

În timpul utilizării continue, temperatura electrolitului va crește, ceea ce va afecta efectul de electroliză. Lăsați electrolitul să se răcească înainte de utilizare.

Când sarcina este prea mare (curentul depășește 15A), întrerupătorul de protecție la suprasarcină se declanșează și electroliza se oprește.

Opriti întrerupătorul de alimentare sau apropiați din nou obiectul de peretele interior al cuvei, apoi verificați dacă întrerupătorul de alimentare este prea aproape.

Dacă efectul de electropolishare nu este satisfăcător, înlocuiți electrolitul și încercați din nou procesul de electropolishare.

Dacă aveți în continuare nelămuriri sau alte întrebări în timpul utilizării, vă rugăm să contactați compania noastră.