

Manualul utilizatorului


Oala termo-baro portabila R-2103-1

Vă mulțumim că ați ales să utilizați această Oala sub presiune, portabilă, R-2103-1.

Pentru a utiliza corect produsul, vă rugăm să citiți cu atenție informațiile despre produs înainte de utilizare.

Vă rugăm să păstrați manualul de utilizare pentru consultare atunci când este necesar.

Introducere:

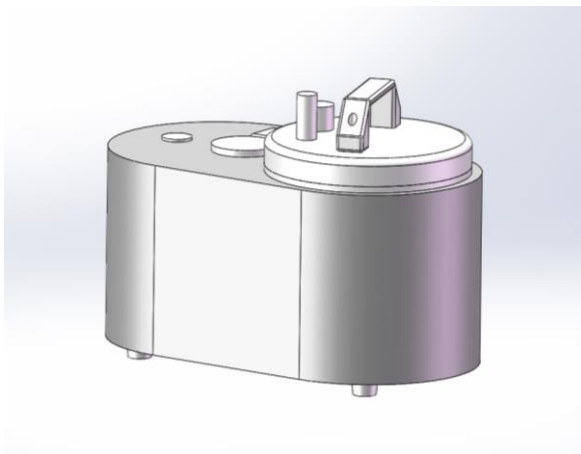

Noua Oala sub presiune R-2103-1 are funcții noi de pompare automată și afișare a temperaturii.

Atâta timp cât apăsați tasta, puteți pompa automat.

În același timp, este echipat cu cel mai recent circuit de protecție. Chiar aceasta nu este supraveghetă în timpul procesului de pompare, nu exista pericolul de suprapresiune.

Pe lângă noua funcție, acesta păstrează și funcția de pompare manuală.

Parameterii:

Model	R-2103-1
Tensiune	DC 24 V
Curent	5.5A
Putere	132 W
Frecventa	50 Hz
Greutate	6Kg
Dimensiuni(mm)	295*165*210

Parti componente:

1. Pompa de aer
2. Alimentator electric extern
3. Cablu alimentare
4. Geanta transport

Instructiuni de utilizare:

1. Porniți sursa de alimentare, rotiți capacul în sens invers acelor de ceasornic, deschideți capacul și adăugați o cantitate corespunzătoare de apă (apă caldă peste 55 °C).

Dacă adăugați apă rece, preîncălziți mai întâi timp de 20 de minute și creșteți temperatura la peste 55 °C.

2. Puneți lucrarea dentară pregătită în oala sub presiune, iar apa nu trebuie să depășească nivelul acesteia.

3. Rotiți capacul în sensul acelor de ceasornic pentru al bloca și apăsați butonul de presurizare ② pentru a porni polimerizarea.

Când presiunea ajunge la 3 kg, presurizarea se va opri automat și va menține aceasta presiune.

4. După aproximativ 30 de minute, deșurubați supapa de eliberare a aerului ④ pentru a elibera presiunea din interiorul oalei, deschideți capacul și scoateți lucrarea dentară.


Notă: Nu stați cu fața spre oala atunci când o de-presurizați.

Presurizare manuala:

1. Deșurubați piulița ⑤ apăsând manual și fixați pompa de aer pe aceasta. (Asigurați-vă că strângeți supapa manuală de suprapresiune ④ înainte de pompare pentru a preveni scurgerile de aer.)

2. Presurizați manual la 3 kg, deconectați pompa și acoperiți piulița.

Interfața aparatului:

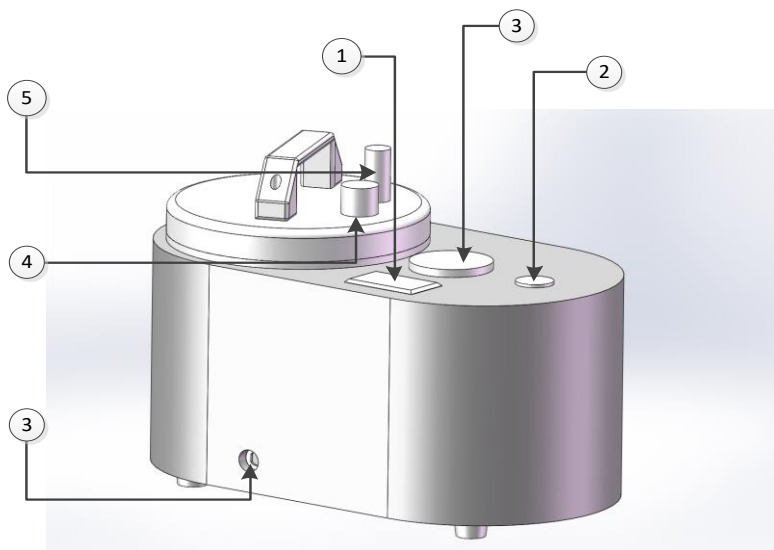

1. Ecran temperatura
2. Buton presiune
3. Manometru presiune
4. Valva eliberare aer
5. Ventil aer

Informații de securitate:

Atenție: este strict interzisă dezasamblarea cutiei acestui echipament și conectarea circuitului acestui echipament fără permisiune!

Probleme care necesită atenție:

1. Presiunea maximă superioară a fost setată la ieșirea din fabrică.
2. Oala sub presiune are o temperatură ridicată de 65 până la 70 de grade Celsius.
3. Înlocuiți bateria LR44 când afișajul temperaturii este descărcat.
4. Sursa de alimentare trebuie să fie împământată corespunzător.

