

Manualul utilizatorului

R-605 Sablator

Vă mulțumim că ați ales sablatorul R-605.

Pentru a asigura o utilizare corectă, vă rugăm să citiți cu atenție informațiile despre produs înainte de utilizare.

Păstrați acest manual de utilizare într-un loc sigur pentru referințe viitoare.

Introducere:



Acest aparat beneficiază de funcția de reciclare a nisipului pentru sablat, cu funcționare sub presiune negativă.

Rezervorul de nisip este realizat integral din aliaj de aluminiu, fiind durabil, rezistent la explozii și cu o durată lungă de viață.

Dispozitivul asigură un flux uniform al nisipului și un raport optim între aer și nisip.

Utilizează țevi importate SINION, cu rezistență ridicată la uzură.

Duza incorporată din oțel tungsten de înaltă calitate este durabilă,

rezistentă la uzură și are o durată lungă de utilizare.

Cilindrul de nisip este proiectat cu un unghi de inclinare al rezervorului de nisipului de 45°, asigurând distribuția optimă a stresului asupra materialelor.


Această construcție rezolvă eficient problemele comune ale cilindrilor de nisip vechi, cum ar fi blocarea sau fluxul scăzut de nisip și exploziile cilindrilor.

De asemenea, reduce uzura și pierderile pieselor de schimb, inclusiv ale racordurilor de intrare și ieșire a nisipului.

Parametrii:

Model	R-605
Tensiune	220 V
Curent	0.3 A
Putere	60 W
Frecventa	50 Hz
Greutate	18 Kg
Dimensiuni (mm)	350*450*500
Presiune de lucru	0-8 Bar

Interfata:

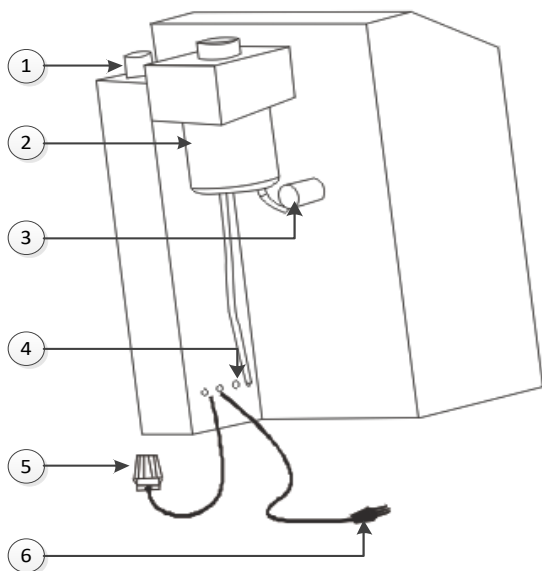

- ① Supapă de reglare a presiunii aerului: reglare presiune (trăgând în sus), presiune fixă (apăsând în jos)
- ② Cilindru de nisip din aluminiu
- ③ Conexiune aspirator
- ④ Suport pentru siguranță
- ⑤ Pedala
- ⑥ Cablu de alimentare

Instructiuni de operare:

Folosiți furtun Φ 8. Conectați furtunul de aer la portul de admisie.

Slăbiți capacul rezervorului de nisip și umpleți cilindrul cu praf de alumina, folosind o pâlnie. Cantitatea de umplere nu trebuie să depășească 2/3 din volumul rezervorului de nisip.

Strângeți capacul cilindrului de nisip.

Conectați cablul de alimentare, apăsați comutatorul de alimentare, iar lumina din interiorul incintei de sablare se va aprinde.

Țineți pistolul mic de sablare cu mănuși de protecție și controlați operațiunea de sablare cu ajutorul pedalei, cu piciorul.

Informatii de securitate:

Atenție: este strict interzis să dezasamblați carcasa echipamentului și să conectați circuitul echipamentului fără permisiune!

Notă:

La conectarea conductei, este necesar să apăsați inelul de pe suprafața conductei pe piuliță.

Varful (diuza) de ieșire a nisipului și conectorul de admisie a aerului al rezervorului de nisip trebuie înlocuite la fiecare 3 luni.

